



USB ALERT


Om USB Alert S

USB Alert S er en signaladapter til registrering af indkommende opkald i TDC Webtekst.

USB Alert S har en indbygget kontakt, som TDC Webtekst kan tænde og slukke i takt med at teksttelefonen ringer. Der kan tilsluttes en alarmgiver til USB Alert S (lyd, lys eller andet)

En **gul indikator** lyser, når USB Alert S er tilsluttet en USB-port og har forbindelse med computeren. Denne indikator **blinker**, når kontakten i USB Alert S er slukket.

Med **TEST-knappen** (ved siden af den gule indikator) kan man teste om kontakten i USB Alert S fungerer korrekt.

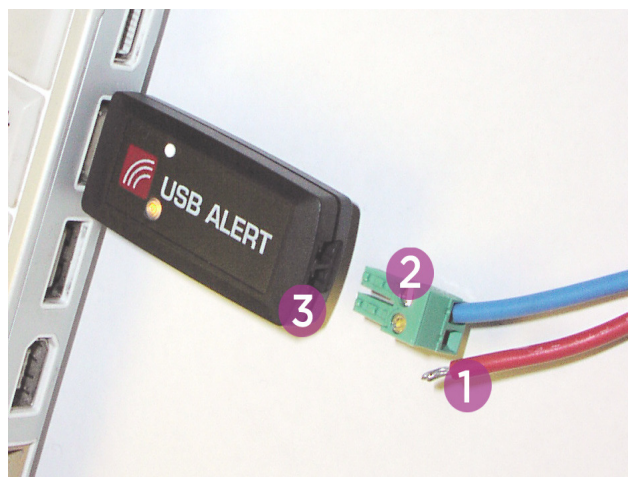

Montering af USB Alert S

- Skær cirka 5 mm af tilslutningsledningerne (1).
- Skru ledningerne fast i det aftagelige stik (2). Vær **sikker** på, at den af-isolerede del af tilslutningsledningerne er stukket helt ind i stikkene og at de er skruet hårdt fast!
- Tilslut den aftagelige kontaktdel (2) til USB Alert S (3)
- Installer driver inden USB Alert S tilsluttes USB-porten i computeren. Se vejledningen "Installer USB Alert S" for yderligere information.
- Tilslut USB Alert S til en valgfri USB-port.

(Første gang USB Alert S tilsluttes til computeren installeres den som ny hardware i form af en COM-port (f.eks. COM3). Denne port skal vælges under Værktøjer- indstillinger - comport i TDC Webtekst).

Driver og installationsvejledning

For at computeren skal kunne kommunikere med USB Alert S, skal den korrekte driver være installeret. Driveren kan hentes på hjemmesiden www.tdcwebtekst.dk. Gå ind i hjælp og find afsnittet "Lyskaldeanlæg". Her finder du vejledningen "Installer USB Alert S" samt link til driveren "Download USB-Alert S". Klik på linket og følg vejledningen.



Tekniske data

USB-forbindelse

USB-A kontakt, han. Støtter USB 2.0.
Maksimalt strømforbrug 90mA.

Styringsledningskontakt

Slukkende kontakt. Maks. 60V, 500mA.
Modstand ved kontakt ≤ 1 ohm.

Maks. lederareal: 2,5 mm²

Min. lederareal: 0,13 mm²

CE-mærkning

USB Alert S er CE-mærket og opfylder kravene i Det medicintekniske Direktiv (93/42/EEG), EMC-direktivet (89/336/EEG) samt i Lavspændingsdirektivet (73/23/EEG).

Når USB Alert S skal kasseres

Udrustningen indeholder elektroniske komponenter, og må derfor IKKE smides ud sammen med almindelig affald fra husholdningen. USB Alert S skal sorteres som *elektronisk affald*, der behandles på en speciel måde af kommunen.

Reparation og service

I tilfælde af behov for service eller reparation, kontakt i første omgang TDC Handicapservice.

Man kan også kontakte Polycom Technologies på telefon:

+46 8 768 00 21 eller e-post:

service@polycom.se

Flere spørgsmål og svar om USB Alert S, kan du finde på producentens hjemmeside www.polycom.se

USB Alert S – et produkt fra

Polycom Technologies